



#### UUE TURBUHALERI KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE

Enne uue Turbuhaleri esmakordset kasutamist peate selle kasutamiseks ette valmistama järgmiselt:

- Keerake kate lahti ja eemaldage see. Võite kuulda lõgisevat heli.
- Hoidke Turbuhalerit püstiasendis nii, et punane käepide jääb allapoole.
- Keerake punast käepidet ühes suunas nii kaugele kui saab. Siis keerake seda teises suunas nii kaugele kui saab (ei ole vahet, kummale poole keeramisega alustasite). Peate kuulma klõpsatust.
- **Korrake kõike, keerates punast käepidet taas mõlemas suunas.**
- Nüüd on Turbuhaler kasutamiseks valmis.

#### ANNUSTE LUGEJA

**Punasel ja rohelisel Turbuhaleril** on annuste lugemiseks aknake, mis näitab, kui palju ravimit on veel alles, kuid **EI NÄITA NUMBRILISELT IGAT ÜKSIKUT ANNUST.**

Loendamine algab alates 60 või 120 annusest, kui inhalaator on täis. Annuse loenduril on intervallid 10 annuse kaupa.

Kui näete esimest korda punast märget loenduri ava ääres, siis on järel veel ligikaudu 20 annust. Inhalaator on tühi, kui punane taust täidab kogu akna ja "0" asub akna keskel.

**Kuna numbrite liikumine toimub väga aeglaselt, siis ei pruugi te seda kohe märgata.**


**Heli, mida kuulete Turbuhaleri raputamisel, tekitab kuivatusaine, mitte ravim. Sellepärast ei saa heli põhjal otsustada, kui palju ravimit on Turbuhaleris järel.**

**Pruuni Turbuhaleri aken on valge ja ilma numbriteta.**

Kui aknas on märgata **punast**, siis on inhalaatoris veel umbes **20 annust**. Inhalaator on **tühi**, kui punane täidab kogu akna.



Turbuhaler **ei sisalda lisaaineid** üldse või sisaldab väga väikeses koguses laktoosi. Kuna pulbri kogus ühes annuses on väga väike, siis satub ravimit suhu vähe ja te **ei pruugi tunda ravimi maitset.**

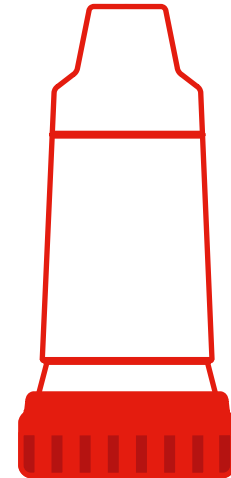

# Turbuhaler

## KASUTUSJUHEND



Turbuhaleri kasutamise video vaatamiseks skaneeri QR kood

Täiendav info:

AstraZeneca Eesti OÜ esindusest  
Valukoja 8, Ülemiste City, Öpik 2, Tallinn 11415  
Tel. 6549600



EE-1232-10-21-R&I



**1** Keerake lahti ja eemaldage Turbuhalerit kaitsev ümbris.



**5** Asetage inhalaatori suuotsik õrnalt hammaste vahele ja sulgege tihedalt huuled. Hingake sügavalt ja jõuliselt suu kaudu sisse.



**2** Hoidke Turbuhaler püstises asendis, värviline osa allpool. Keerake värvilist osa paremale nii kaugele kui võimalik ...



**6** Eemaldage Turbuhaler suust ja hingake soovitatavalt nina kaudu välja. Kui vajate rohkem kui ühte inhalatsiooni, korrake tegevusi 2 kuni 6.



**3** ... ja siis tagasi vasakule **KUNI KUULETE KLÕPSU**. KLÕPS annab märku, et uus annus on sissehingamiseks valmis. **Peale KLÕPSU ärge alumist osa rohkem keerake!**



**7** Pange kaitsev ümbris Turbuhalerile peale tagasi ja keerake kinni.



**4** Hingake sügavalt välja.

**8** Loputage suud veega pärast igapäevast hommikust ja/või õhtust annust ning sülitage loputusvesi välja.

Märkused .....

.....